

골절·염좌 대응 · 차세대 공압식 응급 에어부목

고민 없이 10초 완성, 차세대 에어부목

키큐 뼈긋케어와 에어픽스는 입으로 불 필요 없이, 비전문가도 즉시 환부를 고정하는 공압식 응급 부목 라인업입니다.
현장 비치부터 119 구급까지, 응급처치의 기준을 새로 씁니다.

- 수월하게
- 신속하게
- 간편하게
- 안전하게



뼈긋케어 — 시설 안전관리용 키트 구성

WHY KEEPUPU

현장이 바뀌는 4가지 결정적 차이

01 ⚡ 10초면 끝나는 응급 고정

입으로 불거나 수동 펌프로 3분 넘게 걸리던 팽창을,
CO₂ 카트리지·전자동 에어건으로 단 10초에 완료합니다.
빠른 팽창과 전방위 압박으로 초기 고정에 즉시 대응합니다.

02 🧩 사이즈·부위 고민 없는 설계

손목·발목·무릎·팔꿈치를 원 사이즈 부목 하나로 대응합니다.
부위별 재고 부담을 줄이고, 응급상황에서 부목 선택의 고민을 덜어줍니다.

03 🖐️ 비전문가도 즉시 사용

PRICE 원칙에 따라 직관적으로 설계되어, 전문 인력 없이도 바로 사용할 수 있습니다.
의무대뿐 아니라 사업장 구급함에도 비치하기 적합합니다.

04 🏠 LG화학 공동개발 소재


에어부목의 공압 구조와 사용 특성에 맞춘 LG화학 공동개발 소재를 적용했습니다.
Matt 표면 처리와 유연성·내구성으로 착용감을 높였습니다.

ONE SIZE · 4 PARTS 손목·발목·무릎·팔꿈치 — 부목 하나로 모두




HOW TO USE · 4 STEP 별도 장비 없이, 간편한 4단계 사용법


1 돌리고

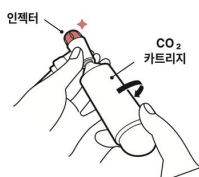


2 잠그고

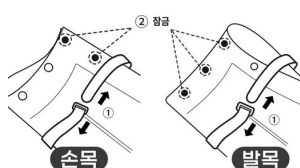

3 넣고

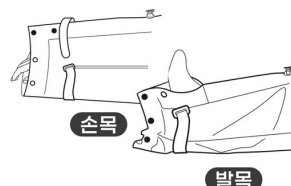

4 열어요

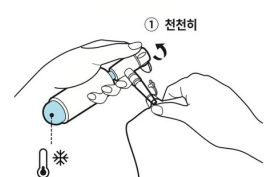

LINE-UP & SPECIFICATION

현장에 맞춘 두 가지 라인업

기업·기관 상시 비치부터 119 구급 현장까지 — 동일한 공압 기술을 두 가지 운용 방식으로 제공합니다. 핵심 규격을 한눈에 비교하세요.

구분	 시설 비치용 삐끗케어 Twist Care · 모델명 AS-Basic200 기업·기관 상시 비치용 폐쇄형 소모품 키트		 119·전문 인력용 에어픽스 Airfix · 모델명 AS-Pro200 회수·반복 사용에 최적화된 오픈형 라인업	
	폐쇄형 (Closed-type)	오픈형 (Open-type)		
부목 형태	폐쇄형 (Closed-type)	오픈형 (Open-type)		
공기 주입	CO ₂ 카트리지 16g · 1회용	C타입 충전형 전자동 에어건		
팽창 속도	약 10초 내외 (표준 환경 기준)	약 10초 내외 (표준 환경 기준)		
작동 압력	약 25-40mmHg	약 25-40mmHg		
규격 · 중량	165 × 145 × 60mm · 480g	183 × 177 × 105mm · 750g		
주요 소재	커버 PU / 부목 PVC · LG화학 공동개발	커버 나일론 / 부목 TPU 또는 PVC · LG화학 공동개발		
운용 콘셉트	1회 사용 후 폐기하는 소모품	회수·세척 후 반복 사용		
주요 적용처	기업·기관·시설 안전관리	소방 · 119 구급대		

PROVEN TECHNOLOGY

검증된 기술, 입증된 신뢰

CO-DEV
LG화학 공동개발 소재

PATENT
기술 특허 2건 출원

DESIGN
도면 디자인권 등록

#	주요 시험 항목	시험 결과
01	압력 유지 성능	40mmHg 주입 후 4시간 동안 압력을 안정적으로 유지하여, 착용 중 지속적인 고정과 압박 성능을 확인
02	반복 사용 내구성	반복적인 공기 주입·배출 이후에도 외관, 밸브, 압력 유지 성능에 이상이 없음을 확인
03	최대 압력 안전성	일반 사용 압력보다 높은 200mmHg 조건에서도 파손이나 외관 이상이 발생하지 않아 구조적 안전성 확인
04	하중 지지 성능	중심 하중, 비대칭 하중, 반복 하중 시험을 통해 부상 부위를 안정적으로 지지하는 고정 성능을 검증
05	원단·구조 내구성	인장·파단 시험을 통해 제품 소재와 접합 구조가 외부 힘에 견디는 물리적 내구성을 확인

의무실 · 의무대

사업장 구역별 구급함

시설 안전관리실

119 구급대

산업안전 현장

스포츠 · 다중이용시설